



A·M·P™

PERSONAL AUDIO AMPLIFIER

MANUAL DE UTILIZARE

Sumar

Caracteristici, Funcții și Identificare 3

Pregătirea aparatului

Baterii 4

Indicatorul de baterie consumată 6

Introducerea și scoaterea aparatului 8

Utilizare

Pornirea și oprirea 9

Reglarea volumului. 10

Setări de volum 11

Îngrijirea aparatului auditiv

Îngrijire 12

Reparații. 12

Ghid de rezolvare a problemelor 13

Sfaturi pentru o comunicare mai bună

Pentru tine 14


Pentru familie și prieteni. 15

Caracteristici, funcții și identificare

Aparatul tău include:

1. Canalul de microfon
2. Canalul de sunet (difuzorul)
3. Ușa bateriei (funcție pornit/oprit)
4. Fir de extracție
5. Localizarea seriei
6. Manșon
7. Baghetă AMP cu funcții de:
 - a) Pornire/oprire și reglare a volumului
 - b) Schimbare a bateriei (opțional)

Deosebești aparatele prin literele L (stânga) sau R (dreapta) inscripționate pe carcasa acestuia

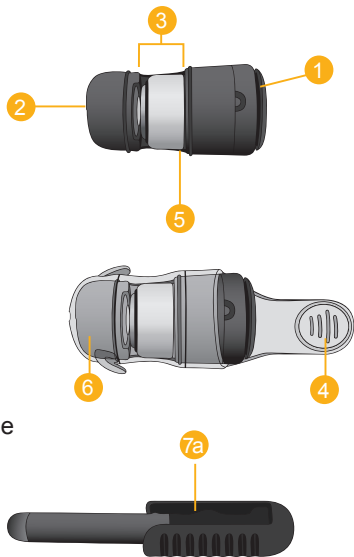


Baterii


Aparatul folosește baterii ca sursă de alimentare. Bateriile sunt de mai multe tipuri (675, 13, 312, 10) și se pot deosebi și după culoarea ambalajului. Aparatul tău folosește baterii tip 10, cu ambalaj galben.

Pentru a schimba bateria:


1. Scoate manșonul.
2. Scoate bateria consumată folosind bagheta sau împingând bateria prin lateral cu degetul.
3. Scoate sigiliul de pe bateria nouă.
4. Pune bateria nouă cu semnul “+” (partea plată) pe aceeași parte cu semnul “+” de pe carcasă.
5. Introdu aparatul înapoi în manșon.

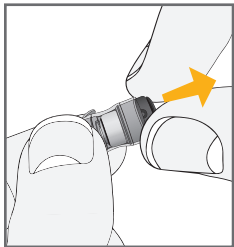


1

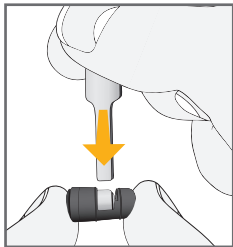

2

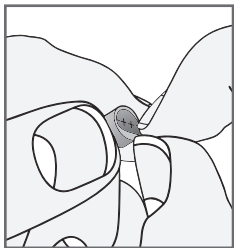

3

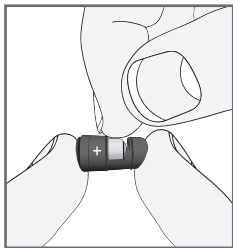

4

Indicatorul de baterie consumată

Când bateria este aproape consumată, se va auzi un semnal sonor. Ai la dispoziție aproximativ 5 minute pentru a înlocui bateria uzată cu una nouă. În caz contrar, aparatul va mai emite un sunet de avertizare și se va opri singur.

** Timpul scurs între primul și al doilea semnal poate varia în funcție de zgomotul din mediu și de marca de baterie folosită.*

Sfaturi utile

- Din cauza dimensiunii reduse ale aparatului și bateriei, este bine să schimbi bateria deasupra unei mese, pentru a evita riscul ca aceasta să cadă pe jos.
- Aruncă imediat o baterie folosită, de preferință într-un container special de reciclare.
- Deoarece bateriile pot avea durate de utilizare și performanțe diferite, întreabă audioprotezistul despre bateriile recomandate pentru aparatul tău.

Atenție!

Bateriile sunt periculoase dacă sunt înghițite.



Nu le lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de casă.



Verifică medicamentele înainte de a le lua - bateriile pot fi ușor confundate cu pastilele.



Nu ține niciodată bateriile în gură indiferent de motiv, pentru a nu le înghiți accidental.



Sfaturi utile

- La început pot să apară mici iritații și inflamații ale pielii până se obișnuiește urechea cu prezența aparatului. Contactează audioprotezistul.
- Dacă apare o reacție alergică, contactează audioprotezistul.
- Inflamațiile puternice, apariția unor secreții, acumularea de ceară în exces sau orice altă problemă necesită consult medical imediat.

Introducerea și scoaterea aparatului

Pentru a așeza aparatul în ureche:

1. Ține aparatul de firul de extracție, între degetul mare și arătător.
2. Introdu cu grijă vârful aparatului în canalul urechii, rotind puțin aparatul spre spate până când găsești direcția corectă. Împinge ușor aparatul cu vârful degetului în canal pentru a-l așeza confortabil.

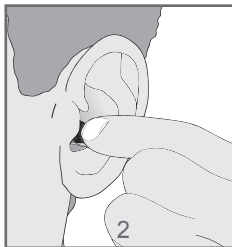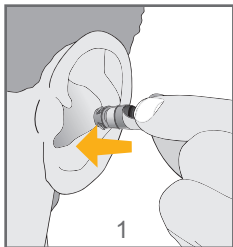

Pentru a scoate aparatul din ureche:


Prinde firul de extracție între degetul mare și arătător și trage aparatul afară din ureche.

Pentru a porni aparatul:

Atinge aparatul cu bagheta în partea dinspre exterior. Un semnal sonor va indica faptul că aparatul a pornit.


Pentru a opri aparatul:

Atinge aparatul cu bagheta în partea dinspre exterior și îndepărtează bagheta repede. Un semnal sonor va indica faptul că aparatul s-a oprit.

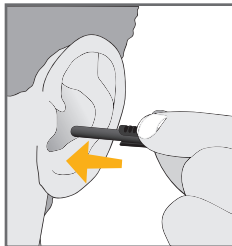

Reglarea volumului

Pentru a schimba volumul, ține bagheta pe sau în apropierea aparatului. Când aparatul este pornit și vrei să reglezi volumul, acesta va crește sau se va diminua în funcție de ultima schimbare făcută. Ține bagheta pe aparat până când ajungi la volumul pe care ți-l dorești. În funcție de setările aparatului, poți avea la dispoziție până la 5 trepte de volum. Aparatul va emite un bip de confirmare de fiecare dată când modifici nivelul volumului.

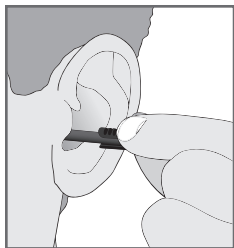

Volumul programat

Aparatul tău auditiv a fost reglat de către audioprotezist la un anumit volum. În cazul în care nivelul general de sunet ți se pare prea tare sau prea slab, contactează audioprotezistul pentru sfaturi sau ajustări.

Setări de volum

Nivel de Volum	Ton
Nivel 5 (Tare)	5 bipuri plus ton
Nivel 4	4 bipuri
Nivel 3 (Volumul programat)	3 bipuri
Nivel 2	2 bipuri
Nivel 1 (Încet)	1 bip plus ton

Întreținerea aparatului auditiv

Îngrijire

Îți recomandăm să păstrezi aparatul auditiv curat în permanență. Căldura, umezeala și substanțele străine pot diminua performanțele de funcționare.

- Curăță-l zilnic deasupra unui prosop pentru a preveni daunele produse de căderea aparatului pe suprafețe dure.
- Folosește periuța de curățare pentru îndepărtarea impurităților din jurul microfonului, orificiului de ieșire a sunetului și a compartimentului de baterie.
- Nu folosi niciodată apă, solvenți și soluții / ulei de curățare pentru a curăța aparatul.
- Manșonul se poate spăla cu apă caldă și săpun

Audioprotezistul tău îți poate da amănunte suplimentare cu privire la procedurile de curățare a aparatului auditiv.

Sfaturi utile

- Dacă urmează să faci o pauză de purtare mai mare, scoate bateria din aparat, așează aparatul în cutia de protecție și păstrează-l:
 - într-un loc uscat, ferit de copii și de animale de companie.
 - departe de acțiunea directă a soarelui sau a unei surse de căldură pentru a preveni defectele cauzate de temperaturi excesive.
- Nu demonta aparatul și nu introduce instrumentele de curățat în interiorul lui.

Reparații

Dacă, din diverse motive, aparatul auditiv nu funcționează corect, NU încerca să-l repari singur. Vei pierde garanția aparatului și ai putea cu ușurință să provoci și alte daune. Dacă performanțele aparatului s-au diminuat, consultă ghidul de mai jos pentru posibile soluții. Dacă problema persistă, contactează audioprotezistul pentru sfaturi și ajutor.

Ghid de rezolvare a problemelor

SIMP TOM	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Nu este îndeajuns de tare	Baterie slabă	Înlocuiește bateria
	Ceară sau impurități în canalul de sunet sau în microfon	Curăță canalul de sunet și microfonul cu periuța
		Scoate și curăță manșonul.
	Modificare a pragului de auz	Contactează audioprotezistul
Funcționează necorespunzător	Baterie slabă	Înlocuiește bateria
Se aude distorsionat	Baterie slabă	Înlocuiește bateria
	Aparat defect	Contactează audioprotezistul
Aparatul nu funcționează	Baterie slabă	Înlocuiește bateria
	Ceară sau impurități în canalul de sunet sau în microfon	Curăță canalul de sunet și microfonul cu periuța. Scoate și curăță manșonul.

Audioprotezistul îți va recomanda un program adecvat pentru a te ajuta să te acomodezi cu noul aparat auditiv. Este nevoie de antrenament, timp și răbdare pentru ca sistemul nervos să se adapteze la noile sunete pe care aparatul ți le oferă. Auzul este doar unul dintre modurile de a recepta gândurile, ideile și sentimentele. Citirea pe buze, expresia feței și gesturile te pot ajuta în procesul de învățare și pot completa ceea ce urechea de una singură ar putea omite.

Parcurge cu atenție următoarele sfaturi de comunicare:

Pentru tine

- Stai mai aproape de persoana care vorbește și uită-te la ea.
- Când vorbești cu cineva, staiți față în față într-o încăpere liniștită.
- Schimbă-ți poziția pentru a găsi locul cel mai potrivit pentru a asculta.
- Redu la minim tot ceea ce îți poate distra atenția.
- Zgomotul de fond poate fi deranjant la început. Acest zgomot a existat întotdeauna în jurul tău, dar nu ai mai putut să-l auzi de mult timp și acum trebuie să te reobișnuiești cu existența lui.

Sfaturi pentru o comunicare mai bună

- Spune celorlalți ceea ce dorești. Mulți oameni nu sunt conștienți de pierderea ta de auz, pentru că aceasta nu se poate vedea.
- Așteaptă-te la rezultate realiste în funcție de ceea ce poate sau nu să facă aparatul auditiv pentru auzul tău.
- Un auz mai bun datorat aparatelor auditive este o capacitate dobândită cu ajutorul dorinței, antrenamentului și răbdării.

Pentru familie și prieteni

Familia și prietenii sunt de asemenea influențați de pierderea ta de auz. Roagă interlocutorii:

- Să se asigure că ești atent înainte de a începe să vorbească.
- Să îți vorbească din față într-o încăpere liniștită.
- Să îți vorbească rar, clar și la un nivel normal; strigând ar putea să facă înțelegerea cuvintelor mai dificilă.
- Să reformuleze în loc să repete fraza cu aceleași cuvinte; este posibil ca unele cuvinte să fie mai ușor de înțeles decât altele.
- Să evite să îți distragă atenția în timp ce se vorbește.



Experience more.™

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344-3476
800.328.8602
www.starkey.com

Starkey Laboratories România
Str. Gheorghe Țițeica nr. 121C,
Sector 2, București
021.311.96.23
www.starkey.ro

© 2010 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved.

84689-000 10/10 BKLT0226-00-EE-ST Rev. A

CE
0086